

Informationen für Einsender – Liquid Biopsy

Blutentnahme 10 ml und Versand in speziellen Röhrcchen, um die zellfreie DNA für die Liquid Biopsy Diagnostik zu stabilisieren:

- Streck Cell-Free DNA BCT Röhrcchen (Streck, Omaha, USA, Artikel-Nr. 218961/218962)
- Butterfly-System mit großem Nadeldurchmesser (z.B. Venofix Safety G19 1,1x19 mm, B. Braun SE, Melsungen, Artikel-Nr. 4056519-01)
- Blutkulturadapter (z.B. Blutkultur-Adapter Universal, Sarstedt, Nümbrecht, Artikel-Nr. 14.1209)
- Versandbox (Sarstedt, Nümbrecht, Artikel-Nr. 95.903)

Blutentnahme:

- Patientenarm in einer abwärts gerichteten Position halten, damit kein Rückfluss entstehen kann
- Röhrcchen möglichst aufrecht halten
- Kein Unterdruck, Blutabnahme dauert länger als gewöhnlich
- Röhrcchen vom Adapter entfernen, unverzüglich 10x invertieren und aufrecht lagern

Versand:

- Versand möglichst innerhalb von 24 Stunden
- Röhrcchen nicht einfrieren – die Röhrcchen können bei Raumtemperatur gelagert und verschickt werden
- Röhrcchen gut gesichert (z.B. in einem Schutzgefäß) in einem mit UN3373 gekennzeichneten Paket verschicken